



GenPE: estudio Internacional de Genética en Preeclampsia

INSTRUCTIVO Toma de muestra proyecto GenPE

ALMACENAMIENTO

1. Inmediatamente después de la separación de componentes, deposite los viales (de **color**) con **plasma**, dentro de la bolsa hermética para plasma (codificación terminada en **P**).
2. Deposite los viales (transparentes) con **suero**, dentro de la bolsa hermética para suero (codificación terminada en **S**).
3. Deposite los viales (transparentes) con **sangre total**, dentro de la bolsa hermética para sangre (marcado solo con el número) al igual que la bolsa pequeña con el plasma de EDTA (codificación terminada en **PE**).
4. Las bolsas pequeñas de plasma, suero y sangre guárdelas dentro de la bolsa grande hermética y almacene en **congelador**.

Nota: si en su institución no se realiza separación de componentes, mantenga los tubos vacutainer en posición vertical y en la parte baja de la nevera (**No congelar**).

5. Registre los datos de fecha, hora y el nombre de la persona que realiza el almacenamiento en la planilla de “*control, recepción y almacenamiento de muestras y documentos*” (**Numeral 3**).

Aprobado: NSD
Revisado: MCP
Elaborado: EGM
Fecha: 10-04-08
versión: 2