

Recomendaciones Generales

Toma de Muestra

1. Dejar secar el alcohol aplicado en la piel antes de introducir la aguja para la toma.
2. Evitar movimientos fuertes de la aguja ya ubicada en la vena.
3. Colocar los torniquetes por lo menos 4cm por encima del área de toma de muestra.
4. Tomar las muestras en el siguiente ORDEN.
Tubo Tapa **Roja** → Tubo Tapa **Gris** → Tubo Tapa **Lila**


Esencial primero tubo seco (tapa roja) y luego los que tienen anticoagulante para evitar contaminación con este último.

Recomendaciones Generales

4. La muestra se debe tomar en su totalidad, **no** retirar el tubo antes del drenado establecido para cada uno:

Tubo Tapa Lila	4ml
Tubo Tapa Gris	6ml
Tubo Tapa Roja	7ml

5. Importante realizar la mezcla por **inversión**, mínimo 5 veces y hasta 8.

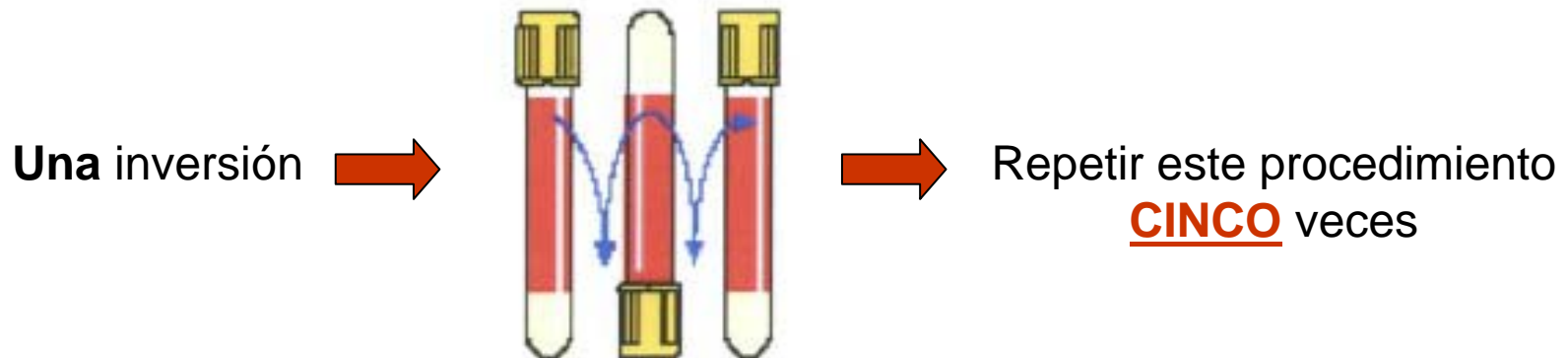

Recomendaciones Generales

6. Una vez tomada la muestra se puede mantener a temperatura ambiente máximo media hora, antes de separar los componentes.

Por favor seguir las recomendaciones del [instructivo para Toma de Muestras Proyecto GenPE](#).

7. Importante:

Todas las muestras deben separarse a la mayor brevedad posible, su congelación se debe hacer de inmediato a -20°C o menos, si es posible.

Por favor completar los datos del [Formato de control de muestras y documentos](#), si tiene dudas verificar las especificaciones en el [instructivo](#).